

**Uyarılar ve Birincil Açıklamalar:**

AKTISCHICHT pansumanının NanoEx kullanımı bir hekim (veya uygun lisanslı uygulayıcı) tarafından veya onun emriyle yapılmalıdır. Pansumanımız steril ve tek kullanımlık bir üründür ve tekrar kullanılmamalıdır. Tekrar kullanılması enfeksiyon veya çapraz bulaşma riskini artırabilir. Ambalajda hasar olduğuna dair kanıt varsa veya son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın. Bu pansuman oda sıcaklığında tutulmalıdır. Ürünü güneş ışığından veya aşırı nemden uzak tutun. Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşarsanız, ürünü kullanmayı bırakın ve derhal sağlık uzmanınıza başvurun. Lütfen kullanım talimatlarına bakın ve bunları dikkatli ve kesin bir şekilde uygulayın.

Endikasyonlar (Amaçlananlar):

Diyabetik ayak ülseri (DFU)

Dekübitüs / yatak yaraları / basınç ülseri

Yanık yaraları

Travma yaraları

Deri greftleri/donör bölgeleri

Cerrahi yaralar

Venöz bacak ülseri (VLU)

Çürük yaraları

Enfekte ve enfekte olmayan yaralar

Açıkta kalan tendonlar ve kemikler

Kuru yaralar ve düşük ila orta düzeyde eksüdatasyonu olan yaralar (yara akıntısı)

Kontrendikasyonlar:

- Yarada malignite
- Keşfedilmemiş fistül
- Tedavi edilmemiş osteomyelit
- Eskar bulunan nekrotik doku
- Açıkta kalan kan damarları veya organlar (ağır kanama)
- Alerjik reaksiyon
- Şiddetli eksüdatasyonu olan yaralar (yara akıntısı)

Lütfen bu ürünle ilgili herhangi bir ciddi olayı  
regulation@aktischicht.ch ve/veya mp-vigilanz@bfarm.de  
adreslerine e-posta ile bildirin.

Bertaraf:

Bu ürün, hastane veya sağlık profesyonelinin tavsiyesine göre (yerel düzenlemelere ve prosedürlere göre) bertaraf edilmelidir.

**Pansuman Matrisi Kullanım Talimatları:**

- 1) Endikasyonu Kontrol Edin. NanoEx by AKTISCHICHT pansumanı, minimal ila orta düzeyde eksüda içeren yaralar/ülserler için endikedir. Yara eksüdası yüksekse ve içinde Silikon veya Kalsiyum Aljinat yoksa süper emici bir ikincil pansuman kullanmayı düşünün.
- 2) Ellerinizi yıkayın, cerrahi eldivenler kullanın ve steril kurulum ve hazırlıklarla çalışın.
- 3) Yarayı/ülseri ve etrafındaki alanı (> 1 cm kenar boşluğu) yıkayın ve standart solüsyonlar (normal salin) kullanarak kirleticileri temizleyin. Lütfen tahriş edici veya sitotoksik temizleme solüsyonları kullanmayın.
- 4) Nekrotik veya hiperkeratotik dokunun debridmanı gerekiyorsa, bunu bir hekimin (veya uygun şekilde lisanslı bir uygulayıcının) yapmasına izin verin.
- 5) Yaranın etrafındaki cildi nazikçe kurulaşın. Herhangi bir kanamaya neden olmamak için önlemler alın.
- 6) Yaranın/ülserin boyutunu ölçün. Paketi açın. Pansumanı kesin ve tam yapışma ve koruma için yaranın etrafını güvenli bir kenar boşluğu olarak 1 cm kapatmayı düşünün.
- 7) Pansumanı yaraya/ülserine koyun. Yara kendi başına yeterince ıslak değilse, fazladan su kalmayacak şekilde uygun miktarda normal tuzlu su veya steril damıtılmış suyla damla damla nemlendirin.
- 8) Pansuman yara/ülser yüzeyine tamamen yapışmamışsa, yara yüzeyine tamamen yapışana kadar steril gazlı bez pedleri veya tıbbi çubuklarla bu bölgelere hafifçe bastırın ve yara yüzeyi ile pansuman arasında hava kalmadığından emin olun.
- 9) Pansumanı, Ag içermeyen, yapışmayan basit bir dış kompres pediyle örtün.

**Yan Etkiler:**

Alerjik reaksiyon veya tahriş durumunda, ürünün kullanımını bırakın.

Hedef Kullanıcılar (Hedef Kullanıcılar):

Yara bakımı ve iyileştirme alanında uygun şekilde lisanslı uygulayıcılar / sağlık profesyonelleri ve teknisyenler.

**Hedef Ortam ve Kullanım Yeri:**

Bu ürünün kullanım yeri için herhangi bir kısıtlama veya sınırlama yoktur.

Hedef Popülasyon:

Yetişkinler (hamileler hariç).

Hedef Yer (Vücuttaki Uygulama Alanı):

Hastanın ihlal edilmiş cildiyle doğrudan temas halinde.

**Uyarılar**

- Bu ürün tek kullanımlıktır ve tekrar kullanılmamalıdır.
- Tekrar kullanımı enfeksiyon veya çapraz bulaşma riskini artırabilir.
- Ciltte kızamık olma durumunda ürünü kullanmayı bırakın.
- Paket hasarlıysa kullanmayın.
- Tercihen oda sıcaklığında kuru ve serin bir yerde saklayın.
- Güneş ışığından veya aşırı nemden uzak tutun.
- Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşarsanız ürünü kullanmayı bırakın ve derhal sağlık uzmanınıza başvurun.

**Sembol**

|  |                                                     |  |                                  |
|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Manufacturer                                        |  | Do not re-sterilize              |
|  | Authorized representative in the European Community |  | Do not re-use                    |
|  | Date of manufacture                                 |  | Consult instructions for use     |
|  | Use-by date                                         |  | Do not use if package is damaged |
|  | Lot Code                                            |  | Keep dry                         |
|  | Catalogue number                                    |  | Keep away from sunlight          |
|  | Sterilized using irradiation                        |  | Latex free                       |
|  |                                                     |  | Upper limit of temperature       |



Nano Fanavaran Narin Teb

Aktischicht Nano F.N Teb Acta1 Holding No 1462 Pharmaceutical Incubator  
Center of Tehran University of Medical Sciences North Kargar Street Tehran,  
Iran



KOMITZ GmbH, Wittgensteinerstr. 20, 57072 Siegen, GERMANY

IFU Ref.Nr. IFU\_EX\_MDD Dated 01.09.2024